


AJEX - VÝMĚNA ŽÁROVKY

- a) Vypněte zařízení a vypojte jej od zdroje napájení
- b) Pomocí šroubováku uvolněte šroubky a odejměte vnější ochranný kryt lampy viz. fig. 12



fig. 12

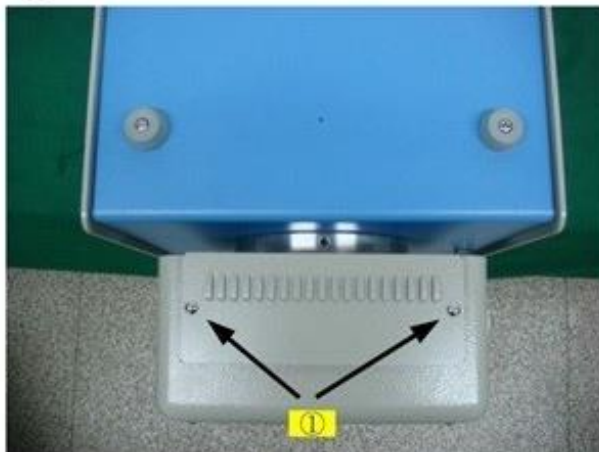

Nedotýkejte se ochranného krytu lampy (vnitřního, ani vnějšího), ani halogenové lampy, dokud nevyzkoušíte jejich teplotu. Hrozí nebezpečí popálení, vzniklé kontaktem s lampou, nebo s ochranným krytem, těsně po vypnutí lampy.

- c) Uvolněte šroubky a odejměte vnitřní ochranný kryt lampy viz. fig. 13

fig. 13

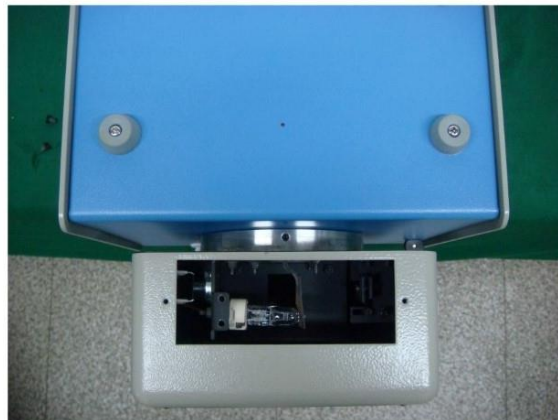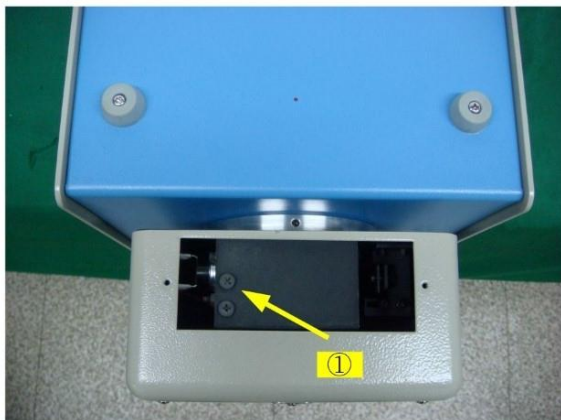

Nedotýkejte se ochranného krytu lampy (vnitřního, ani vnějšího), ani halogenové lampy, dokud nevyzkoušíte jejich teplotu. Hrozí nebezpečí popálení, vzniklé kontaktem s lampou, nebo s ochranným krytem, těsně po vypnutí lampy.

- d) Odejměte a vyměňte halogenovou lampu.
- e) Vraťte a přišroubujte zpět vnitřní a poté vnější ochranný kryt halogenové lampy.

V případě problémů, při výměně žárovky u RTG AJEX a Gierth, kontaktuje prosím technika ATOMVET na telefonním čísle +420 702 011 161.